

\*\* 2017年11月(第5版)  
\* 2015年1月(第4版)(新記載要領に基づく改訂)

届出番号:13B2X10060010000

医 01 エックス線フィルム  
一般医療機器 スクリーン型医用X線・画像診断用フィルム JMDNコード 40979000  
**スクリーン型医用X線・画像診断用フィルム**

**【形状、構造及び原理等】**

1. 形状、構造  
支持体に銀塩感光材料を塗布したものです。
- \*\* 2. 動作原理  
フィルム乳剤中のハロゲン化銀に電磁波または光が照射されると、不可視な像が形成され、この像を現像することで、診断可能な可視画像となります。

**【使用目的又は効果】**

医用画像用に設計されているX線フィルムをいう。主に増感紙や他の可視光源から発せられた光の波長に対して感受性が高いフィルムをいう。

**\*\*【使用方法等】**

フィルムをX線フィルムカセットに装填し、X線撮影を行った後、現像処理を行う。又はフィルムに適合した画像診断用イメージャに装填し、ハードコピー用として使用する。

詳細は設置要項及び取扱説明書を参照してください。

**\*\*【使用上の注意】**

1. 適切な安全光の下で開封すること。
2. 開封後はなるべく早めに使用すること。又、遮光のため、内袋に入れたまま保管すること。
3. 局部的に折り曲げたり、擦ったり、強い圧力をかけたりしないこと。
4. フィルムが接着するような極度な高湿下での取扱いは避けること。
5. 静電気が発生するような極度な低湿下での取扱いは避けること。
6. 濡れた手による取扱いは避けること。
7. 二重露光は避けること。

**【保管方法及び有効期間等】**

1. 保管方法  
フィルムは直射日光を避けて、放射線やX線及び有害ガス(ホルマリンガス、硫化水素ガス等)の影響を受けない低温・低湿の場所に保管してください。推奨温度・湿度は、それぞれの商品の個包装上に明記してあります。
2. 有効期間  
有効期間(使用期限)は、それぞれの商品の個包装上に明記してあります。

**\*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者名:ケアストリームヘルス株式会社  
電 話:03-5646-2500(代)

製造業者名:ケアストリームヘルス  
Carestream Health, Inc.  
アメリカ

取扱説明書を必ずご参照ください。